

SOCZEWKI KONTAKTOWE  
I PŁYNY PIELEGNACYJNE



# KATALOG PRODUKTÓW

UV Schutz  
protection



TECHNOLOGIA *Bio*Lens®

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

**EXPERT KRAK** Sp. z o.o.  
ul. Mackiewicza 17A, 31-214 Kraków  
tel: (012) 288 30 52, fax: (012) 278 18 49  
e-mail: zeiss@exciteSun.com.pl, www.exciteSun.com.pl  
Skype: zeiss.exciteSun.com.pl, gg: 2769921



### Wiązanie wody:

Zdolność zatrzymywania wody w istocie właściwej rogówki zapewniają siarczany keratanu i siarczany chondroityny. Dzięki równocześnie występującym w cząsteczkach ładunkom dodatnim i ujemnym możliwe jest wiązanie w istocie właściwej rogówki stałej ilości wody. Ten naturalny efekt wykorzystano przy opracowaniu soczewek **ZEISS CONTACT DAY30 compatic**. Vitafilcon A zawiera zsyntetyzowaną i odpowiednią dlapolimeryzacji formę tych substancji, biokompatybilną w 100%.

Podsumowanie:

**ZEISS CONTACT DAY30 compatic:** jest soczewką z materiału doskonale wiążącego wodę.



### Odporność na tworzenie się osadów:

Charakterystyczna budowa biochemiczna Vitafilconu A w dużym stopniu wyklucza tworzenie się osadów. Wiąże się to głównie z rozkładem ładunków w poszczególnych częściach składowych rogówki. Istotną rolę odgrywają przy tym z jednej strony bipolarnie związki siarczanowe, a z drugiej zawarte w fibrylach kolagenowych aminokwasy (glicyna i prolina). Z tego powodu zintegrowano w łańcuchach polimerowych Vitafilconu A również sekwencje aminokwasów.

Podsumowanie:

**ZEISS CONTACT DAY30 compatic:** wykazuje nadzwyczaj małą skłonność do tworzenia się osadów.



### Biokompatybilność:


Bionika to dyscyplina nauki, która zajmuje się analizą biologicznych fenomenów w celu umożliwienia ich odtwarzalności w technice. Vitafilcon A jest materiałem bionicznym: dzięki zastosowaniu elementów składowych pod względem budowy zbliżonych do ludzkich oraz ich zintegrowaniu w sztucznej polimerowej strukturze stworzony został materiał, który pod względem swoich pozytywnych właściwości jest odpowiednikiem istoty właściwej rogówki ludzkiego oka. Opracowana w zakładzie *Wöhlk* i opatentowana technologia *BioLens*<sup>®</sup> gwarantuje tym samym prawdziwą i pełnowartościową biokompatybilność.

Podsumowanie:

**ZEISS CONTACT DAY30 compatic:** gwarantuje prawdziwą i pełnowartościową biokompatybilność.



Porównanie czasu utraty wody w soczewce.

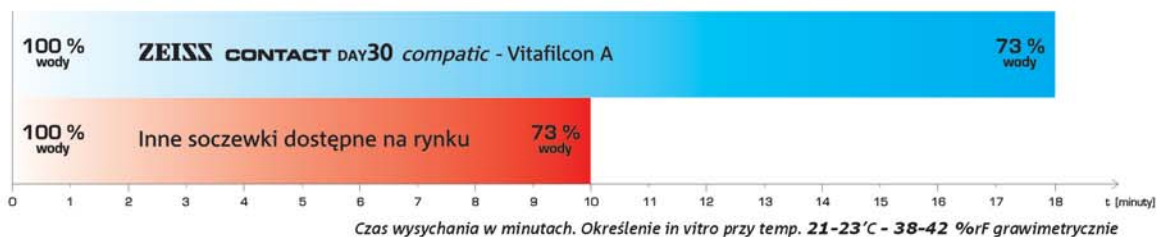

# ZEISS CONTACT DAY1 Easy Wear


## Dane techniczne:

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Materiał:             | Methafilcon A, jonowy      |
| Zawartość wody:       | 55%                        |
| Zabarwienie:          | jasnoniebieskie            |
| Tech. wytwarzania:    | proces wytłaczania         |
| Współczynnik Dk/L:    | 24                         |
| Grubość środkowa      | (-3,00 dpt.): 0,08 mm      |
| Pow. tylnia:          | 2-krzywiznowa sferyczna    |
| Pow. przednia:        | wielokrzywiznowa sferyczna |
| Sr. strefy optycznej: | 8,60 mm                    |



**ZEISS CONTACT DAY1 Easy Wear** to soczewka jednodniowa skoncentrowana na maksymalnym komforcie noszenia oraz doskonałej ostrości widzenia bez konieczności używania płynów pielęgnacyjnych. Jest to najwygodniejszy sposób noszenia soczewek kontaktowych dla osób, które decydują się na soczewki tylko sporadycznie - np. podczas uprawiania sportu czy wyjątkowych okazji.

## Geometria:

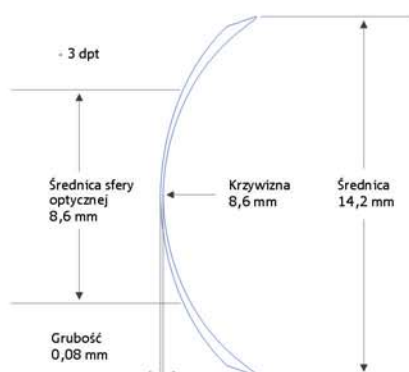

## Cechy wyróżniające soczewki ZEISS DAY1 Easy Wear

- Idealnie czysta każdego dnia.
- Doskonały komfort noszenia.
- Wyszlifowana ostrość widzenia.
- Odporność na osadzanie się osadów.
- Lepsza centracja dzięki asferycznej budowie frontu soczewki.
- Niezwykle łatwe zakładanie i zdejmowanie soczewki.
- Idealna dla alergików.
- Prostsze otwieranie opakowania.
- Likwidacja sferycznych aberracji.
- Filtr UV.

## Zakres dostępnych mocy:

|             |                |
|-------------|----------------|
| Sfera:      | -9 -6 +4 +6,50 |
| Krzywizna:  | 8,60 mm        |
| Średnica:   | 14,20 mm       |
| Opakowanie: | 30 szt.        |
|             | 5 szt.         |

■ - co 0,25 dpt.  
■ - co 0,50 dpt.

## Cena detaliczna:

|   |            |
|---|------------|
| Soczewki jednodniowe 30 szt.(ZEISS1DAY30_005595): | - 69,00 zł |
| Soczewki jednodniowe 5 szt.(ZEISS1DAY5_001290):   | - 19,00 zł |

# ZEISS CONTACT DAY30 *compatic*

## Dane techniczne:


|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Materiał:             | Vitaflcon A, 46%<br>biokompatybilny |
| Zawartość wody:       | 54%                                 |
| Zebarwienie:          | jasnozielone                        |
| Tech. wytwarzania:    | odlew kształtowy                    |
| Współczynnik Dk/L:    | 22                                  |
| Grubość środkowa      | (-3,00 dpt.): 0,09 mm               |
| Pow. tylnia:          | 2-krzywiznowa sferyczna             |
| Pow. przednia:        | krzywiznowa sferyczna               |
| Sr. strefy optycznej: | 8,50 mm                             |

## Zalecenia dotyczące dopasowania:

- Dopasowanie w zakresie minusowym rozpoczynać od krzywizny podstawowej 8,60 mm.

## Geometria:

Przekrój przez sferę peryferyjną soczewki

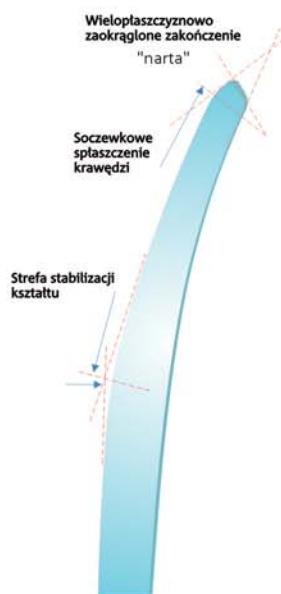

**ZEISS CONTACT DAY30 *compatic*** to nowa biokompatybilna miesięczna soczewka kontaktowa, wyprodukowana według technologii **BioLens®**. Dzięki połączeniu nadzwyczaj dobrze tolerowanego materiału nowej generacji Vitaflconu A oraz cienkiej geometrii soczewki o dużej ruchomości **ZEISS CONTACT DAY30 *compatic*** jest odpowiednia dla wrażliwych oczu, a nawet suchych. Każdego dnia, przez cały miesiąc.

## Cechy wyróżniające soczewki ZEISS DAY30 *compatic*:

- Wysoki i natychmiastowy komfort użytkowania oraz bardzo dobra długookresowa tolerancja.
- Biokompatybilność dzięki materiałowi przypominającemu rogówkę.
- Odpowiednia do przedłużonego użytku dziennego (do 18 godzin).
- Wyśmienite nawilżenie.
- Minimalne wysychanie soczewki dzięki wysokiej zdolności wiązania wody.
- Wysoka transmisja tlenu dzięki niewielkiej grubości oraz specjalnemu nowo zaprojektowanemu kształtowi krawędzi - "narta".
- Niezwykle łatwe manipulowanie soczewką dzięki strefie stabilizowania kształtu.
- Łatwe rozpoznanie stron soczewki dzięki technologii modelowania kształtu.
- Bardzo wysoki wskaźnik doskonałego dopasowania.
- Filtr UV.

## Zakres dostępnych mocy:

|             |   |
|-------------|---|
| Sfera:      | -12 -6 +5 +8  |
| Krzywizny:  | minus 8,30*/8,60/8,90 mm<br>plus 8,30*/8,60**/8,80 mm |
| Średnica:   | 14,20 mm  |
| Opakowanie: | 6 szt.  |

\* - Dostępne na specjalne zamówienie tylko w średnicy 13,60 mm  
\*\* - Dostępne na specjalne zamówienie.

- co 0,25 dpt.  
 - co 0,50 dpt.

## Cena detaliczna:

Soczewki mies. sferyczne 6 szt.(ZEISS30DAY\_007500): **- 115,00 zł**

# ZEISS CONTACT DAY30 *compatic toric*

## Dane techniczne:


|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Materiał:             | Vitafilcon A           |
|                       | biokompatybilny        |
| Zawartość wody:       | 54%                    |
| Zebarwienie:          | jasnozielone           |
| Tech. wytwarzania:    | odlew kształtowy       |
| Współczynnik Dk/L:    | 22                     |
| Grubość środkowa      |                        |
| (-3,00 dpt.):         | 0,09 mm                |
| Śr. strefy optycznej: | ≥ 9,00 mm              |
| stabilizacja:         | dynamiczna, po 30 sek. |



## Zalecenia dotyczące dopasowania:

- Przeprowadzić badanie wstępne:
  - ostrość wzroku pod okulary
  - badanie przy użyciu autokeratometru
- Dokonać przeliczenia mocy ostrości wzroku dla okularów na moce soczewek kontaktowych.
- Zamówić bezpłatną parę soczewek diagnostycznych.
- Skontrolować dopasowanie soczewek.
- Zamówić soczewki o właściwych parametrach.

## Geometria:

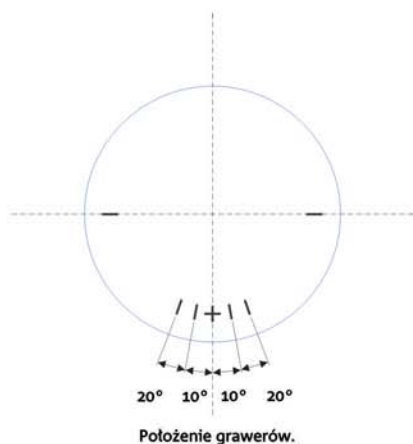

**ZEISS CONTACT DAY30 *compatic toric*** to nowa biokompatybilna toryczna soczewka planowej wymiany dla wrażliwych oczu. Wysoki komfort noszenia został osiągnięty poprzez znakomite trzymanie środkowe. Smukła geometria soczewki oraz duża strefa optyczna dba o wysoką naturalną przejrzystość widzenia. W każdej sytuacji soczewki **ZEISS CONTACT DAY30 *compatic toric*** dostarczają maksymalnej przyjemności z użytkowania. Każdego dnia, przez cały miesiąc.

## Cechy wyróżniające soczewki ZEISS cd30 *compatic toric*:

- Materiał jak w soczewce **ZEISS cd30 *compatic***.
- Nowa toryczna geometria, bez pryzmatu.
- Bardzo smukły kształt (o 40% smuklejszy od poprzednich soczewek torycznych).
- Szybka samoczynna stabilizacja (około 30 sekund).
- Łatwe operowanie soczewką.
- Duża strefa optyczna (> 9,0 mm).
- Idealna dla oczu wrażliwych i suchych.
- Filtr UV.

## Zakres dostępnych mocy:

|             |                             |    |
|-------------|-----------------------------|----|
| Sfera:      | -6                          | +4 |
| Cylinder:   | -0,75/-1,25/-1,75/-2,25 dpt |    |
| Oś:         | 0° do 180° co 10°           |    |
| Krzywizna:  | medium (około 8,70 mm)      |    |
| Średnica:   | 14,40 mm                    |    |
| Opakowanie: | 6 szt.                      |    |

- co 0,25 dpt.

## Cena detaliczna:

Soczewki mies. toryczne 6 szt.(ZEISS30DAYT\_011900): **- 199,00 zł**

## wöhlk CONTACT.PLUS DAY90

### Dane techniczne:

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Materiał:                         | Poly-Alkymethacrylat-NVP<br>niejonowe |
| Zawartość wody:                   | 55%                                   |
| Zebarwienie:                      | bezbarwne                             |
| Współczynnik Dk/L: 23             |                                       |
| Grubość środkowa<br>(-3,00 dpt.): | 0,10 mm                               |
| Sr. strefy optycznej:             | 8,50 mm                               |




### Zalecenia dotyczące dopasowania:

- Dopasowanie w zakresie minusowym rozpoczynać od krzywizny podstawowej 8,60 mm.

CONTACT.PLUS DAY90 jest soczewką niejonową, średnio uwodnioną kwartalnej wymiany, zaprojektowaną do noszenia dziennego.

### Geometria:

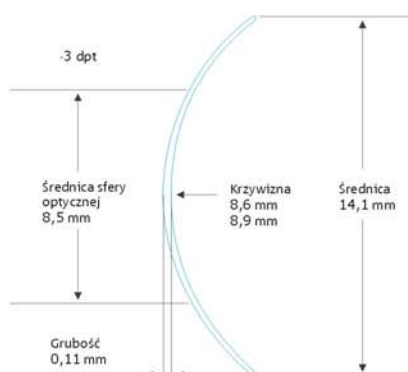

### Cechy wyróżniające soczewki CONTACT.PLUS DAY90:

- Niejonowy materiał, dzięki któremu soczewki są odporne na tworzenie się osadów.
- Niezwykle łatwe manipulowanie soczewką i jej zakładanie.
- Ponadprzeciętna trwałość.
- Optymalne nawilżanie i ostrość wzroku.
- Ekonomiczny wybór.

### Zakres dostępnych mocy:

|             |   |
|-------------|---|
| Sfera:      | -10 -6 +5 +8                              |
| Krzywizny:  | minus 8,60/8,90* mm<br>plus 8,60*/8,90 mm |
| Średnica:   | 14,10 mm                                  |
| Opakowanie: | 2 szt.                                    |

\* - Dostępne na specjalne zamówienie.

-10 - co 0,25 dpt.  
-6 - co 0,25 dpt.\*

### Cena detaliczna:

Soczewki kwortalne 2 szt.(WÖHLKc.plus90DAY2\_003600): **- 69,00 zł**

# ZEISS CONTACT DAY30 colours

## Dane techniczne:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Materiał:          | HEMA-MAA Copolymer |
| Zawartość wody:    | 60%                |
| Współczynnik Dk/L: | 21                 |
| Grubość środkowa   |                    |
| (-3,00 dpt.):      | 0,12 mm            |
| Średnica tęczówki: | 12 mm              |
| Średnica źrenicy:  | 5,5 mm             |



## Sposób pielęgnacji:

- Wszystkie płyny do miękkich soczewek kontaktowych

**ZEISS CONTACT DAY30 colours** rozjaśniają twoje oczy dzięki ośmiu atrakcyjnym kolorom. Odzworowanie budowy tęczówki zapewniło bardzo udany efekt naturalnego spojrzenia. Soczewki tak jednokolorowe, jak i trójkolorowe zapewniają wysoki komfort użytkowania. Kolor nie znajduje się bezpośrednio na powierzchni soczewki, tylko pod cienką warstwą polimerów. Zapobiega to podrażnieniu oka oraz nieumyślnemu wycieraniu koloru podczas aplikacji soczewek.


## Soczewki jednokolorowe:



## Cechy wyróżniające soczewki ZEISS DAY30 colours

- Doskonała kolorystyka.
- Wysoki komfort.
- Ośmiu atrakcyjnych kolorów.
- Dostępne "plano" jak i w mocach.
- Powiększona przestrzeń dla źrenicy - doskonała jakość widzenia.
- Soczewki jednokolorowe - podkreślają naturalny kolor oczu.
- Soczewki trójkolorowe - mocno zmieniają kolor oczu.

## Soczewki trójkolorowe:

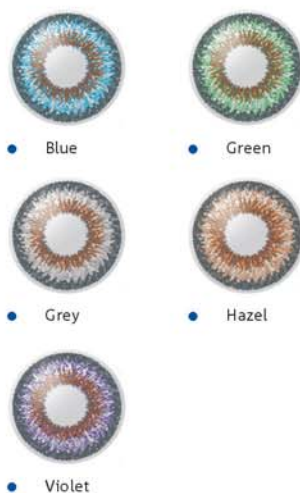

## Zakres dostępnych mocy:

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Sfera:         | -6 0                                 |
| Krzywizna:     | 8,60 mm                              |
| Średnica:      | 14,00 mm                             |
| Opakowanie:    | 2 szt.                               |
| Jednokolorowe: | Royal Blue, Crystal Blue, Jade Green |
| Trójkolorowe:  | Blue, Green, Grey, Hazel, Violet     |

- co 0,25 dpt.

## Cena detaliczna:

|  |            |
|--|------------|
| Soczewki jednokolorowe 2 szt.(ZEISS30col1_004600): | - 74,00 zł |
| Soczewki trójkolorowe 2 szt.(ZEISS30col3_005300):  | - 84,00 zł |

## soczewki kontaktowe dostępne na specjalne zamówienie

### Miękkie, klasyczne soczewki kontaktowe.

| Nazwa:                             | Materiał:                                       | Ø (mm) | Krzywizna (mm):       | Sfera (dpt):   |
|------------------------------------|---|--------|-----------------------|--|
| <b>Weflex<sup>®</sup> 55</b>       | Poly-Alkyl-methacrylat NVP 55% H <sub>2</sub> O | 13,70  | 8,10 do 9,30 (co 0,3) | -20  +20   |
|                                    |   | 14,30  | 8,40 do 9,60 (co 0,3) | -20  +10   |
| <b>Weflex<sup>®</sup> 55 toric</b> | Poly-Alkyl-methacrylat NVP 55% H <sub>2</sub> O | 14,30  | 8,40 do 9,60 (co 0,3) | -20  -10  +10  +20<br>cylinder: -0,50 do -2,50 dpt. (co 0,25 dpt.)<br>-3,00 do -6,00 dpt. (co 0,50 dpt.)<br>oś: 5° do 180° (co 5°) |

Dk: 23 x 10 do - 11 - co 0,50 dpt. - co 0,25 dpt.

**Weflex<sup>®</sup> 55** to roczna, miękka, sferyczna lub toryczna (krzywiznowa) soczewka kontaktowa. Szeroki zakres dostępnych mocy, cylindrów, średnic jak i krzywizn pozwalają specjalście dobrać właściwą soczewkę do naprawdę każdego rodzaju oka. Krótki czas oczekiwania na zamówiony produkt, fachowa pomoc pracowników naszej firmy, niewątpliwa jakość i uznanie marki dają możliwość uzupełnienia swojej oferty oraz dotarcie do klientów ceniących sobie komfort i wygodę przez cały rok.



#### Kod zamówienia:

Soczewki **Weflex 55** 1 szt. (WholkW551\_013200)

Soczewki **Weflex 55 toric** 1 szt. (WholkW55t1\_020900)

### Sztywne soczewki kontaktowe - RGP (stałokształtne)

| Nazwa:                                | Materiał:                            | Ø (mm) | Krzywizna (mm):        | Sfera (dpt): |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|--------------|
| <b>Conflex-air<sup>®</sup> 100 UV</b> | Fluor-Silikon-Methacrylate-Copolymer | 9,30   | 7,20 do 8,40 (co 0,05) | -20  +20     |
|                                       |                                      | 9,80   | 7,30 do 8,50 (co 0,05) |              |
|                                       |                                      | 10,30  | 7,40 do 8,60 (co 0,05) |              |

Dk: 100 x 10 do - 11 - co 0,25 dpt.

**Conflex-air<sup>®</sup> 100 UV** to idealny wybór przy zwiększonym zapotrzebowaniu oka na tlen oraz do długotrwałego noszenia. Sztywna soczewka to także oczywisty wybór dla osób uprawiających sport na wolnym powietrzu oraz w okresie zimowym (ochrona UV). Soczewka wykonana jest ze sprawdzonego, bardzo dobrze tolerowanego materiału o dobrej zwilżalności. Polecana również dla użytkowników z nierównomiernym filmem łzowym.

Geometria - tylna powierzchnia jest opracowana wg. koncepcji sferycznej wielokrzywiznowej. Lekka sferyczność i zaokrąglona końcówka "narty" zapewniają doskonały komfort noszenia przy dobrej ruchomości i odpowiedniemu nawilżaniu soczewki.

UV Schutz protection



#### Kod zamówienia:

Soczewki **Conflex-air100** 1 szt. (WholkC100UV1\_013800)

### Stożek Rogówki - Keratoconus.

| Nazwa:                                   | Materiał:                            | Ø (mm)            | Krzywizna (mm):        | Sfera (dpt): |
|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| <b>Conflex-air<sup>®</sup> 100 UV KE</b> | Fluor-Silikon-Methacrylate-Copolymer | 8,80              | 5,00 do 8,90 (co 0,05) | -30  +30     |
|  |                                      | do 10,30 (co 0,1) |                        |              |

Dk: 100 x 10 do - 11 - co 0,25 dpt.

Sferyczna lub asferyczna roczna, wysoko gazoprzepuszczalna soczewka dla osób ze stożkiem rogówki - Keratoconus. Szeroki zakres dostępnych parametrów soczewki **Conflex-air<sup>®</sup> 100 UV KE** daje pewność, iż soczewka zostanie idealnie dopasowana do kształtu stożka rogówki.



#### Kod zamówienia:

Soczewki **Conflex-air100K** 1 szt. (WholkC100UVKE1\_029500)

**ZEISS ALL-IN-ONE ADVANCE**

**Doskonałe rozwiązanie dla systemów planowej wymiany.**

**ZEISS ALL-IN-ONE ADVANCE** to płyn do pielęgnacji wszystkich rodzajów miękkich soczewek kontaktowych. Czyści, dezynfekuje, nawilża, płucze, eliminuje białko i tłuszcze, służy do przechowywania soczewek.

Zawiera unikalną aktywną substancję **ActiPro**<sup>®</sup> usuwającą uporczywe osady białkowe i tłuszczowe. W odróżnieniu od innych produktów, **Actipro**<sup>®</sup> współpracuje doskonale z soczewkami wykonanymi z materiału silikonowo-hydrożelowego.

Jak działa **ActiPro**<sup>®</sup>

Zaawansowane osady białkowo-tłuszczowe na powierzchni soczewki wybitnie zmniejszają komfort ich noszenia. **ActiPro**<sup>®</sup> osadza się na powierzchni soczewek podczas ich przechowywania w nocy. Hydrofobowe właściwości substancji czyszczącej powoduje, że cząsteczki wody łatwiej i trwale osadzają się na powierzchni soczewki. Dzięki temu nieporządane osady mogą być zdecydowanie skuteczniej usunięte poprzez płukanie.


**Cena detaliczna za jedno opakowanie:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Płyn pielęgnacyjny 360 ml (ZEISSAD360_002897): | - <b>44,00 zł</b> |
| Płyn pielęgnacyjny 100 ml (ZEISSAD100_001182): | - <b>19,00 zł</b> |

**wöhlk perfect cleaner&conditioner**

**Płyny do pielęgnacji sztywnych soczewek kontaktowych.**

**Wöhlk perfect** jest dwustopniowym systemem pielęgnacji do sztywnych soczewek kontaktowych (gazoprzepuszczalnych). Oferuje kompleksową pielęgnację - usuwanie białka, czyszczenie, dezynfekcję oraz nawilżanie. Buforowany, izotoniczny roztwór, nie zawiera substancji Thiomersal. Dostępny jako zestaw oraz w wersji pojedynczego roztworu.


**Cena detaliczna:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Płyn pielęgnacyjny 120 ml (ZEISSWO120_001800):     | - <b>32,00 zł</b> |
| Płyn pielęgnacyjny 30 ml (ZEISSWO30_001600):       | - <b>32,00 zł</b> |
| Płyn pielęgnacyjny 45+15 ml (ZEISSWO45+15_001900): | - <b>35,00 zł</b> |






## Soczewki kontaktowe dla oczu wrażliwych




Specjalistyczne badania nad nowym materiałem dla soczewek kontaktowych doprowadziły do odkrycia materiału bionicznego jakim jest **Vitafilicon A**. Soczewki **ZEISS CONTACT DAY30 compatic** zdecydowanie poleprzyły wiązanie wody w porównaniu do innych soczewek silikonowo-hydrożelowych. Materiał Vitafilicon A wykazuje dużą wytrzymałość na wysychanie, zapewniając pełen komfort dla użytkownika przez cały dzień.

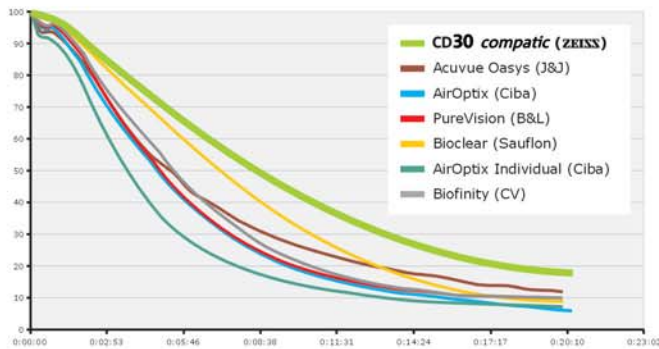

Ilustracja:  
Krzywe utraty wody na krzemiennym żelu (klimatyczna komora)  
**Cd30 Compatic vs. Hydrożel-/SiHy-Wettbewerb 20 min. 15% rF /at 22 st. C (in-vitro)**

Acuvue Oasys jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Johnson&Johnson Vision Care. Air Optix i Air Optix Individual jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy CIBA Vision. PureVision jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bausch&Lomb. Biofinity jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cooper Vision. Bioclear jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sauflon.

Najbardziej istotna cecha charakterystyczna dla biokompatybilności soczewki **ZEISS CONTACT DAY30 compatic** jest **wysoka zdolność wiązania wody**. Wpływa to na wartość poślizgową soczewki zapewniając komfort użytkownika i gwarantuje zachowanie stabilnego kształtu. Soczewki **ZEISS CONTACT DAY30 compatic** wykazują zdecydowanie niższy współczynnik tarcia w porównaniu z soczewkami silikonowo-hydrożelowego. Oznacza to iż soczewka jest odczuwalna jako bardzo miękka i delikatna. Minimalna siła tarcia eliminuje podrażnienia powierzchni rogówki i powieki.

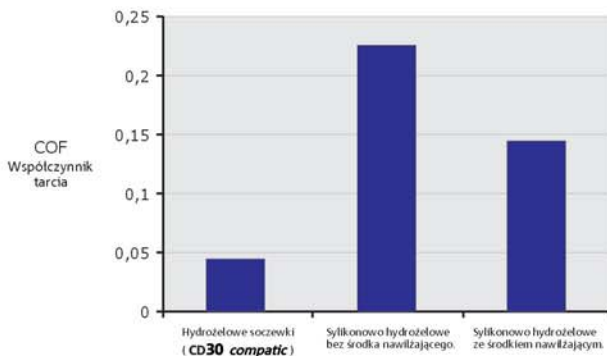

Ilustracja:  
"Fragmenty badań na temat cech charakterystycznych dotyczących tarcia na powierzchni soczewek kontaktowych; CA, USA, 2007".

**ZEISS CONTACT DAY30 compatic** oraz materiał **Vitafilicon A** zostały nagrodzone **Sicca Reserch Prize by BVA Working Group "Dry Eyes"**.

## OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

### TABELA PRZELICZENIOWA:

Moc soczewek kontaktowych w zależności od odległości szkła okularowego od szczytu rogówki.

| Soczewki kontakt. plus | Okulary | Soczewki kontakt. minus |
|------------------------|---------|-------------------------|
| 12 mm                  | (D)     | 12 mm                   |
| + 3,75                 | 3,50    | - 3,25                  |
| + 4,00                 | 3,75    | - 3,50                  |
| + 4,25                 | 4,00    | - 3,75                  |
| + 4,50                 | 4,25    | - 4,00                  |
| + 4,75                 | 4,50    | - 4,25                  |
| + 5,00                 | 4,75    | - 4,50                  |
| + 5,25                 | 5,00    | - 4,75                  |
| + 5,50                 | 5,25    | - 5,00                  |
| + 6,00                 | 5,50    | - 5,25                  |
| + 6,25                 | 5,75    | - 5,50                  |
| + 6,50                 | 6,00    | - 5,75                  |
| + 6,75                 | 6,25    | - 5,75                  |
| + 7,00                 | 6,50    | - 6,00                  |
| + 7,25                 | 6,75    | - 6,25                  |
| + 7,75                 | 7,00    | - 6,50                  |
| + 8,00                 | 7,25    | - 6,75                  |
| + 8,25                 | 7,50    | - 7,00                  |
| + 8,50                 | 7,75    | - 7,00                  |
| + 8,75                 | 8,00    | - 7,25                  |
| + 9,25                 | 8,25    | - 7,50                  |
| + 9,50                 | 8,50    | - 7,75                  |
| + 9,75                 | 8,75    | - 8,00                  |
| +10,00                 | 9,00    | - 8,00                  |
| +10,50                 | 9,25    | - 8,25                  |
| +10,75                 | 9,50    | - 8,50                  |
| +11,00                 | 9,75    | - 8,75                  |
| +11,25                 | 10,00   | - 9,00                  |
| +12,00                 | 10,50   | - 9,25                  |
| +12,75                 | 11,00   | - 9,75                  |
| +13,25                 | 11,50   | -10,00                  |
| +14,00                 | 12,00   | -10,50                  |

### DOSTAWY:

Towar zamówiony do godziny 14.00 zwyczajowo jest wysyłany w dniu przyścia zamówienia. Towar wysyłany jest za pobraniem - płatny przy dostawie:

- Przesyłki o wartości faktury do 99 zł netto są pokrywane w całości przez kupującego. Przygotowanie paczki 5 zł netto + koszt transportu.
- Przesyłki o wartości faktury od 100 zł netto do 399 zł netto są pokrywane przez kupującego w wysokości zryczałtowanej opłaty 7 zł netto.
- Przesyłki o wartości faktury przekraczającej 400 zł netto są dostarczane bezpłatnie.

### PŁATNOŚCI - RABATY:

Przy płatnościach gotówkowych (płatność za pobraniem) i wartości faktury przesyłki przekraczającej 99 zł netto udzielamy rabatu w wysokości 3%. Rabat 2% za zamówienie złożone faksem lub przez internet. Dodatkowe upusty są zależne od obrotu rocznego i udzielane na początku kolejnego roku kalendarzowego. Promocje i ceny specjalne nie są wliczane do obrotu rocznego. Promocje i ceny specjalne nie są sumowane i nie podlegają dodatkowym upustom.

### PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:

|          |               |
|----------|---------------|
| Katowice | 0506 18 45 30 |
| Warszawa | 0506 18 45 31 |
| Wrocław  | 0506 18 45 34 |
| Poznań   | 0506 18 45 37 |

### SZKOLENIA I INFORMACJE TECHNICZNE:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dział marketingu      | 0506 18 45 32           |
| Poczta elektroniczna  | expert@exciteSun.com.pl |
| Informacja techniczna | 0506 18 45 35           |

### REKLAMACJE:

- Towar wadliwy podlega wymianie. Powinien zostać dostarczony do siedziby Expert Krak Sp. z o.o. wraz z oryginalnym, nieszkodzonym opakowaniem (nr. LOT oraz kod kreskowy).
- Reklamacja powinna zawierać numer faktury i pisemną informację wyjaśniającą przyczynę zwrotu. Towar pełnowartościowy z datą ważności krótszą niż 6 miesięcy nie podlega wymianie.






# OFERTA HANDLOWA ZEISS

NUMER KLIENTA:

HASŁO DOSTĘPU:

## MIĘKKIE SOCZEWKI KONTAKTOWE:

| Nazwa produktu:   | Jednostka:                                | Cena sugerowana dla konsumenta (zł): |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>CONTACT DAY1</b><br><i>Easy Wear</i>        | 30 szt.<br>w opakowaniu                   | 69,00                                |
|   | 5 szt.<br>w opakowaniu                    | 19,00                                |
| <b>CONTACT DAY30</b><br><i>compatic</i>        | 6 szt.<br>w opakowaniu                    | 115,00                               |
| <b>CONTACT DAY30</b><br><i>compatic toric</i>  | 6 szt.<br>w opakowaniu                    | 199,00                               |
| <b>CONTACT.PLUS DAY90</b>                     | 2 szt.<br>w opakowaniu                    | 69,00                                |
| <b>CONTACT DAY30</b><br><i>colours</i>       | 2 szt.<br>w opakowaniu<br>(jednokolorowe) | 74,00                                |
|   | 2 szt.<br>w opakowaniu<br>(trójkolorowe)  | 84,00                                |

## PŁYNY PIELĘGNACYJNE:

| Nazwa produktu:  | Jednostka:            | Cena sugerowana dla konsumenta (zł): |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>ALL-IN-ONE</b><br><b>ADVANCE</b>                     | 360 ml<br>w butelce   | 44,00                                |
|  | 100 ml<br>w butelce   | 19,00                                |
| <b>wöhlk perfect</b><br><b>cleaner&amp;conditioner</b>  | 120 ml<br>w butelce   | 32,00                                |
|  | 30 ml<br>w butelce    | 30,00                                |
|  | 45+15 ml<br>w butelce | 35,00                                |